

INNOWACYJNA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Incidin® OxyFoam & OxyWipe

Gotowe do użycia produkty do mycia i dezynfekcji z szybkodziałającym H_2O_2 ™

Innowacyjna formuła Incidin OxyFoam i Incidin OxyWipe zapewnia szereg korzyści płynących z zastosowania opatentowanego* roztworu nadtlenku wodoru.

Środki te są skuteczne wobec szerokiego spektrum bakterii i wirusów oraz nie pozostawiają żadnych czynnych pozostałości na powierzchni dzięki dużej szybkości parowania.

Incidin OxyFoam i OxyWipe zapewniają:

- ▲ Szybko działający H_2O_2 ™
- ▲ Zgodność z normą EN 16615
- ▲ Substancję aktywną rozkładającą się na wodę i tlen
- ▲ Doskonałą kompatybilność materiałową



NOWOŚĆ



Incidin® OxyFoam & OxyWipe

Gotowe do użycia produkty do mycia i dezynfekcji z szybkodziałającym H₂O₂TM

15 SEK.¹ Bakteriobójczy
(EN 16615)

15 SEK.¹ Wirusobójczy wobec wirusów osłonionych

15 MIN.¹ Wirusobójczy wobec norowirusów

Główne cechy	Korzyści
SKUTECZNY	Szerokie spektrum działania Krótkie czasy działania
BEZPIECZNY	Substancja aktywna rozkładająca się na wodę i tlen. Doskonała kompatybilność materiałowa
WYGODNY	Jednoczesne mycie i dezynfekcja Gotowe do użycia

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I WIRUSOLOGICZNYCH

SKUTECZNOŚĆ ŚRODKA NIEROZCIEŃCZONEGO	OxyFoam CZAS DZIAŁANIA	OxyWipe CZAS DZIAŁANIA
Normy europejskie (warunki brudne) – Test 4 pól		
EN 16615 bakteriobójczy	15 sek.	5 min.
EN 16615 drożdżobójczy	15 sek.	1 min.
EN 16615 grzybobójczy	5 min.	5 min.
EN 16615 prątkobójczy, mykobakteriobójczy	15 min.	60 min.
Normy Europejskie (warunki czyste i brudne)		
EN 14476 Adeno	30 sek.	1 min.
EN 14476 Noro	15 min.	60 min. (warunki brudne)
Działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonionych - zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) 1/2004* (warunki brudne):		
Skuteczny wobec wirusów osłonionych wg zalecenia RKI z 01/2004 r.*	15 sek.	30 sek.
Polyoma SV40*	30 sek.	30 sek.
Rota*	30 sek.	30 sek.

* DVV 2008

Testy wykonano na roztworze odcisniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615).

SKŁAD MATERIAŁOWY CHUSTECZEK

OPAKOWANIE	SKŁAD	GRAMATURA	WYMIARY
100 chusteczek	60% PET Politereftalan etylenu, 40% wiskoza	50 g/m ²	200 x 200 mm

INCIDIN OXYFOAM SPOSÓB POSTĘPOWANIA



- 1 Spryskaj powierzchnię z odległości ok. 30 cm
- 2 Przetrzyj powierzchnię upewniając się, że jest całkowicie zwilżona
- 3 Pozostaw do wyschnięcia



- 1 Nałóż środek na ręcznik jednorazowy
- 2 Przetrzyj powierzchnię upewniając się, że jest całkowicie zwilżona
- 3 Pozostaw do wyschnięcia

SKUTECZNY BEZPIECZNY WYGODNY

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Incidin OxyFoam: gotowy do użycia preparat w postaci piany/sprayu do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG).

Incidin OxyWipe: Szybko-działające, gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjno-myjące do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG).

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Incidin OxyFoam: Spryskać z odległości ok. 30 cm nierozcieńczonym preparatem dezynfekowane powierzchnie. Upewnij się, że powierzchnia została całkowicie pokryta preparatem. Pozostawić produkt przez czas działania a następnie przetrzeć ręcznikiem jednorazowym, pozostawić do wyschnięcia. Ewentualnie, nierozcieńczony produkt nanieść na ręcznik papierowy. Przetrzeć nim dezynfekowane powierzchnie. Pozostawić do wyschnięcia.

Incidin OxyWipe: Chusteczki wyjmować pojedynczo z pojemnika. Przetrzeć nimi dezynfekowane powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia, nie sputkiwać. Należy zwrócić uwagę na dokładne zwilżenie powierzchni. Po użyciu zamknąć pojemnik.

Okres trwałości po pierwszym otwarciu:

Incidin OxyFoam: koniec okresu ważności
Incidin OxyWipe: 1 miesiąc

UWAGA

Produkty nie przeznaczone do dezynfekcji końcowej inwazyjnych wyrobów medycznych. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie czynników utleniających, takich jak marmur, miedź lub mosiądz.

SKŁAD

100 g preparatu jako substancje czynne zawiera:

Incidin OxyFoam: 1,5 g nadtlenu wodoru
Incidin OxyWipe: 1,0 g nadtlenu wodoru.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS	ILOŚĆ	KOD
Incidin OxyFoam	6 x 750 ml	3082180
Incidin OxyWipe	6 x 100 chusteczek	3082380

Przypisy:
1. Incidin OxyFoam (EN 16615 / EN 14476)

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE STOSUJ BEZPIECZNIE. PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ETYKIETĄ PRODUKTU. WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.

CE 0297

Producent:
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab - Allee 1
40789 Monheim am Rhien
Germany

Dystrybutor:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
www.ecolab.pl